

Fristentabelle

Produkt	täglich	wöchentlich	monatlich	halbjährlich	jährlich	2 jährlich	4 jährlich	5 jährlich
Behandlungseinheit					mit elektr. Chirurgie	ohne elektr. Chirurgie		
Amalgamabscheider	Filter reinigen	Filter reinigen			Funktionsprüfung			Funktionsprüfung
Filter Absaugung	reinigen	reinigen	bei Bedarf erneuern	erneuern				
O-Ringe		Zustand überprüfen						
Sicherheitstechn. Überprüfung				Sicherheitsschalter	MPG / VDE 0751	MPG / VDE 0751		
Wartung					vom Hersteller empfohlen			
Zusatzgeräte								
Elektrochirurgie					MPG / VDE 0751			
Laser					Prüfung durch Hersteller			
Heal Ozone				Prüfung durch Hersteller				
Dentale Kleingeräte						MPG / VDE 0751		
Entwicklungsautomat :	2 = nur Periomat							
Chemikalien		nachfüllen (2)	wechseln					
Wasser		1-2 x wechseln (2)						
Konstanzprüfung Filmverarbeitung		mit Zahnfilm 1 Gerät						
Reinigung			Spezialreiniger gem. Hersteller		Spezialreiniger gem. Hersteller			
Röntgen						MPG / VDE 0751		
Konstanzprüfung			Alle Rö-Geräte					
TÜV -Überprüfung								sehr wichtig
Kompressor								
Druckbehälterprüfung								sehr wichtig
Filter					erneuern			
Saugmaschine								
Filter					erneuern/reinigen			
Abluftfilter (falls vorhanden)						erneuern		
Thermodesinfektor								
Sicherheitstechn. Überprüfung /Wartung					Wartung gem. Herstellerempfehlung			
Autoklav								
Kessel		Reinigen, mit Alkohol auswischen						
Sporentest				gem. Herstellerempfehlung				
Sterifilter erneuern					gem. Herstellerempfehlung			
Wartung						gem. Herstellerempfehlung		
Magnetventil für Wasserversorgung				Wie ?? Nach Rücksprache mit Techniker vor Ort				
	Bitte informieren Sie sich über die Fristen und Verordnungen, die von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben sind. (z. B. Überprüfung des Arbeitsschutzes, Fluchtwege, Überprüfung der gesamten elektr. Anlage in der Praxis, u.s.w.)							
Stand 01.05.2011	Helferin durchführbar	Laut Verordnung oder Gesetz durch Sachverständiger		laut Hersteller oder Gesetz vom Techniker durchzuführen		Empfehlung vom Techniker		